

Gravtest[®] • Seguro easy 99,5% precisão

Leia cuidadosamente as

informações do teste antes de abrir o envelope.

Cuidado ao manusear o envelope ou o dispositivo de teste, evitando contaminá-lo. Cada Kit de diagnóstico de gravidez Grav test[®]

easy contém:

- 01 Envelope aluminizado contendo uma tira do teste acompanhado de um saquinho de sílica-gel (DEVE SER DESCARTADO!);
- 01 Folheto de instruções de uso.

Cada tira de teste de gravidez Grav test[®] easy contém: Anticorpo

policonal IgG, Anticorpo A monoclonal anti-hCG e Anticorpo B monoclonal anti-hCG equivalentes a sensibilidade mínima de 25 mUI/ml de hCG. **Princípio de Ação:** A Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) é um hormônio secretado pelo desenvolvimento da placenta imediatamente após a fertilização, sendo presente nos primeiros estágios de gravidez. A tira de Grav test[®] easy possui anticorpos que detectam o antígeno hCG na urina. Por se tratar de uma reação imunológica específica, o teste elimina a possibilidade de reação cruzada com outros hormônios análogos, em níveis fisiológicos normais.

A sensibilidade declarada do Grav test[®] easy é de 25 mUI/mL de hCG. O teste deverá ser realizado com uma amostra da primeira urina da manhã que contém maior concentração de hCG. É aconselhável não urinar por pelo menos 6 horas antes do teste. Grav test[®] easy, após comparações com outros testes de diagnóstico de gravidez "in vitro", obteve precisão de 99,5% quando utilizado corretamente conforme as instruções. Pela sensibilidade do teste, o resultado será positivo desde o primeiro dia de atraso do ciclo menstrual em mulheres que estejam grávidas. É importante ressaltar que, para se obter resultado satisfatório, as instruções deverão ser seguidas, para que não se tenha resultados falsos ou inválidos.

IMPORTANTE:

- O envelope contendo a tira só deverá ser aberto no momento do teste.
- O TESTE DEVERÁ SER FEITO COM UMA AMOSTRA DA PRIMEIRA URINA DA MANHÃ.
- O resultado do teste deverá ser lido após 5 minutos da execução do mesmo.
(Não leia o resultado com tempos menores ou maiores do que 5 minutos).

SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO (não se destina a uso interno).

Precauções:

Manter o produto em temperatura ambiente e fechado até o momento do uso (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. Após o teste, descarte o Kit em lixo seco normal. **Não descarte o produto em tanques, pias ou vasos sanitários após o uso.** Não utilize o produto se o prazo de validade estiver vencido.

INSTRUÇÕES DE USO :

- Abra o envelope de alumínio e retire a tira segurando pelo suporte (FIGURA 1).
 - Colete uma amostra da primeira urina da manhã, em um recipiente apropriado (limpo e seco). Não ultrapasse o nível máximo indicado na tira de teste (FIGURA 2).
 - Insira a tira de teste, sendo que o nível da urina não ultrapasse a marca azul impressa na tira, posicionada logo abaixo das setas (FIGURA 3).
 - Deixe a tira em contato com a urina por 5 minutos. Retire a tira e faça a leitura do teste (FIGURA 4).
- Se aparecer: **Uma faixa ROSA, o resultado é NEGATIVO. Duas faixas ROSAS, o resultado é POSITIVO.** A intensidade da cor rosa da segunda faixa no resultado positivo, não é relevante, pois aparecendo duas faixas rosas, o resultado é **positivo**.

IMPORTANTE :

Desconsiderar a interpretação do resultado do teste após 10 minutos do início da execução. **NENHUMA FAIXA ROSA, o resultado é INVÁLIDO.** Neste caso, as instruções não foram seguidas corretamente ou a tira ficou exposta a umidade ou condições adversas antes do teste. Repita o teste utilizando outro kit do produto.

"ATENÇÃO"

Dentro de cada embalagem protetora da tira reagente, tem um sachê (saquinho) contendo sílica gel que protege a tira contra umidade. Este sachê não deverá ser usado na realização do teste, devendo ser descartado. **IMPORTANTE: O sachê não deverá ser aberto ou deixado ao alcance das crianças.**

LIMITAÇÕES:

Urinas diluídas (com níveis de hCG abaixo de 25 mUI/mL), o teste resultará em falso negativo. Deve ser utilizada a primeira urina da manhã para garantir níveis de hCG acima de 25 mUI/mL. As usuárias portadoras de anomalias tais como: doença trofoblástica, proteinúria, hematuria, coriocarcinoma, teratomas ovarianos, causam elevados níveis de hCG, resultando em falso positivo.

TESTE PARA CONFIRMAÇÃO DE GRAVIDEZ

Leia cuidadosamente as informações do teste **Grav test® easy** antes de abrir a embalagem de proteção. Cuidado ao manusear o envelope ou a tira reagente, evitando amassar ou rasgar.

FIGURA 1



- Recorte o envelope no local indicado por um pequeno picote.



- Retire a tira segurando pelo suporte

FIGURA 2

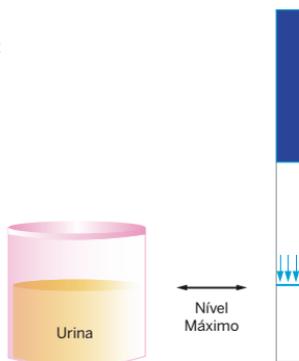


FIGURA 3

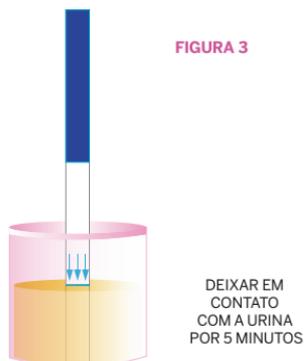


FIGURA 4

Se aparecer na tira:



UMA faixa rosa o resultado é **NEGATIVO - Não GRÁVIDA**



DUAS faixas rosas o resultado é **POSITIVO - GRÁVIDA**

Fabricante: **Discount Diagnostics** - 825 College Blvd, # 102-444 - Oceanside, CA - 92057 - USA - **Distribuidor no Brasil:** **Neckerman Indústria Farmacêutica Ltda.** Rua das Perobeiras, 1422 - CEP: 05879-470 - São Paulo - SP - CNPJ: 48.113.906/0001-49 - Indústria Brasileira - Farm. Resp.: Cristiano de Souza Dias - CRF-SP 33.483 Reg. MS: 80145070002 - ® Marca Registrada